

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- ⤿ Les châssis MOTILO doivent être utilisés dans les limites de poids et tailles conseillées
- ⤿ Le patient ne doit pas être installé dans la selle lors du réglage de hauteur et d'inclinaison
- ⤿ Nous recommandons l'utilisation de ce châssis en intérieur sur un sol lisse et plat sous la surveillance d'une tierce personne
- ⤿ Nous recommandons l'utilisation de frein filet LOCTITE 243 (Z31-243) sur la visserie pour sécuriser les réglages
- ⤿ La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre d'utilisation
- ⤿ L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- ⤿ Stocker le produit à l'abri de l'humidité
- ⤿ La fréquence des visites de contrôle du châssis reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller
- ⤿ Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de solvants

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.



Désignation

Jeu de carters plastique pour MOTILO. Livré avec quincaillerie pour fixation.

Coloris de carter




Destination

Dispositif de séparation jambier pour déambulateur destiné à des enfants polyhandicapés ou atteints d'infirmité motrice cérébrale.

Compatibilités

- ⤿ T0030-X : Motilo Taille 0
- ⤿ T1030-X : Motilo Taille 1
- ⤿ T2030-X : Motilo Taille 2
- ⤿ T3030-X : Motilo Taille 3

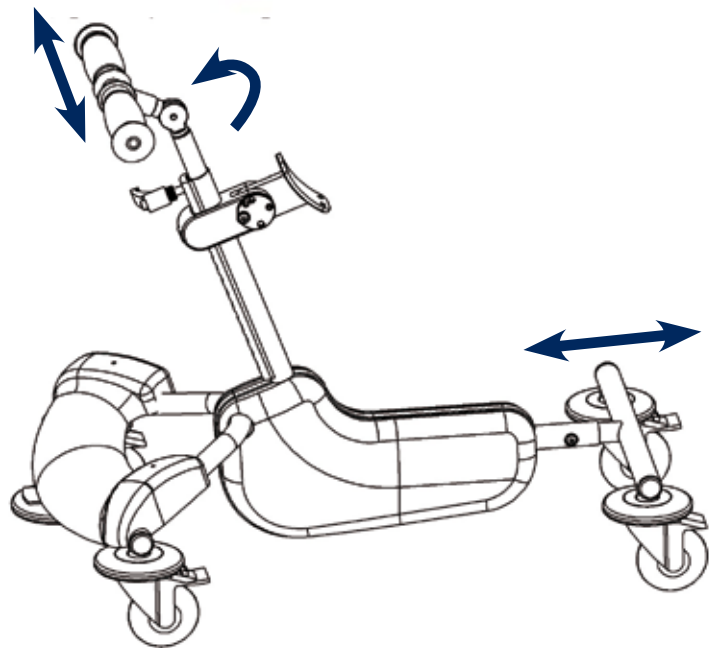

Monter le carter avant au travers des trous prévus à cet effet.

Sous la tête de vis, insérer la rondelle clip qui servira à fixer le chapeau de protection.



Assembler les deux carters latéraux en clipsant les carters sur la structure.
A l'aide des vis auto foreuses, assembler les deux demi carter entre eux.

