


## Pièces détachées

		section 18 x 2	section 20 x 2,5	section 20 x 3
1	Butée de flexion	PU1-1F0°/60°/80°/100°	PU1-2F0°/60°/80°/100°	PU1-3F0°/60°/80°/100°
2	Butée d'extension	PU1-1E0°/6°/10°/20°/30°	PU1-2E0°/6°/10°/20°/30°	PU1-3E0°/6°/10°/20°/30°
3	Bague bronze	V0170-0608020	V0170-0608025	V0170-0608030
4	Culot	V0030-1	V0030-2	V0030-3
5	Vis de fixation	V0029-1	V0029-2	V0029-3
6	Vis FHC	V05I-0306	V05I-0308	V05I-0310
7	Jeu complet de butées	PU1-1BEF	PU1-2BEF	PU1-3BEF

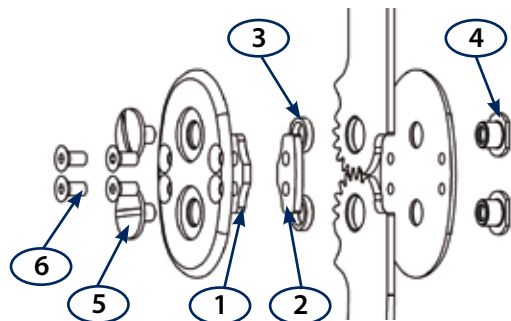

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Ne pas chauffer les articulations (utilisation possible du canon air chaud pour décoller les vis uniquement)
- L'articulation doit être utilisée suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre d'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.

Groupe G2M


168 ZA des Aubrières - 49412 SAUMUR Cedex (FRANCE)

Tél. : +33 (0)2 41 50 50 91 - Fax : +33 (0)2 41 83 05 82 - E-mail : info@groupe-g2m.com  
www.groupe-g2m.com

Janton

NOTICE TECHNIQUE D'INSTRUCTION

## PU1-1/PU1-2/PU1-3 et PU2-1/PU2-2/PU2-3

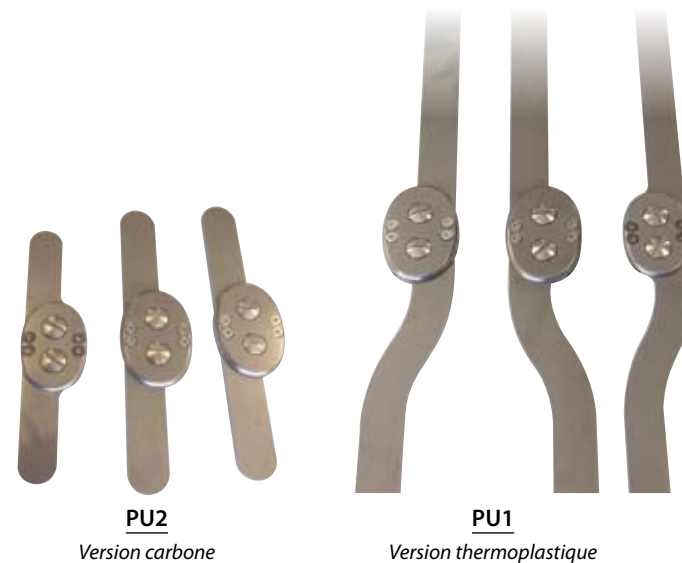


## Désignation

### PU1

Articulation de genou polycentrique inox pour application thermoformée.

- Livrée avec son jeu complet de butées.
- Extension --> 0° / 6° / 10° / 20° / 30°
- Flexion --> 0° / 60° / 80° / 100°

	Poids (g/paire)	A (section mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
PU1-1	432	18 x 2	300	300	18	6	18
PU1-2	630	20 x 2,5					
PU1-3	754	20 x 3					

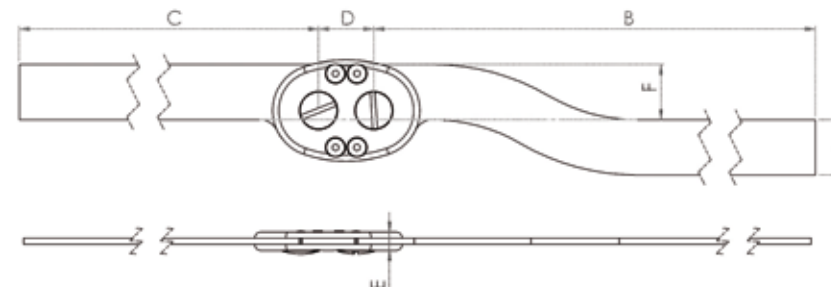


## PU2


Articulation de genou polycyclique inox pour application stratifiée.

- ↳ Livrée avec son jeu complet de butées.
- ↳ Extension --> 0° / 6° / 10° / 20° / 30°
- ↳ Flexion --> 0° / 60° / 80° / 100°

	Poids (g/paire)	A (section mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
PU2-1	162	18 x 2	59	59	18	6
PU2-2	262	20 x 2,5	69	69	20	7,5
PU2-3	314	20 x 3				9

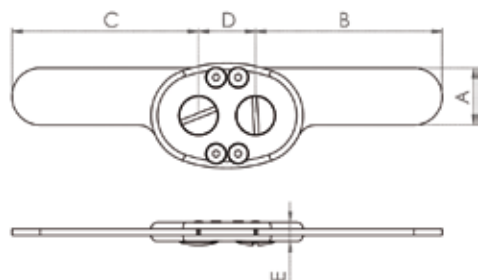

### Gamme de butées

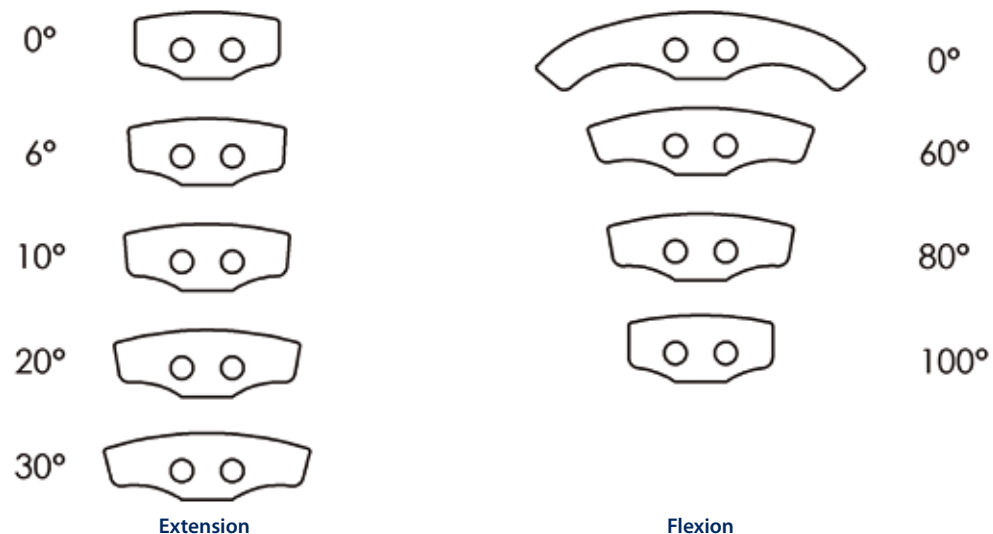

### Destination

Articulation de genou polycyclique entrant dans la fabrication d'orthèse du membre inférieur.

### Compatibilités

Ces articulations sont compatibles avec les techniques de fabrication par thermoformage ou stratification.

## Mise en place


Les branches doivent être griffées à froid. Utiliser des griffes adaptées et veiller à ne pas déformer la zone proche du capotage (ce qui risquerait d'empêcher le pivotement).

Utiliser la graisse MOLYCKOTE Z10 pour le graissage des zones en mouvement.


Sortie d'usine, les vis de l'articulation ne sont pas montées au frein filet. Avant mise en place sur le patient, figer toutes les vis (5) avec du frein filet Z31-243 (LOCTITE 243) et toutes les vis (6) avec du frein filet Z31-222 (LOCTITE 222).

L'emploi en mono montant n'est possible que sur la section en 3 mm.

Vérifier que le dégauchi de l'appareil soit optimal.

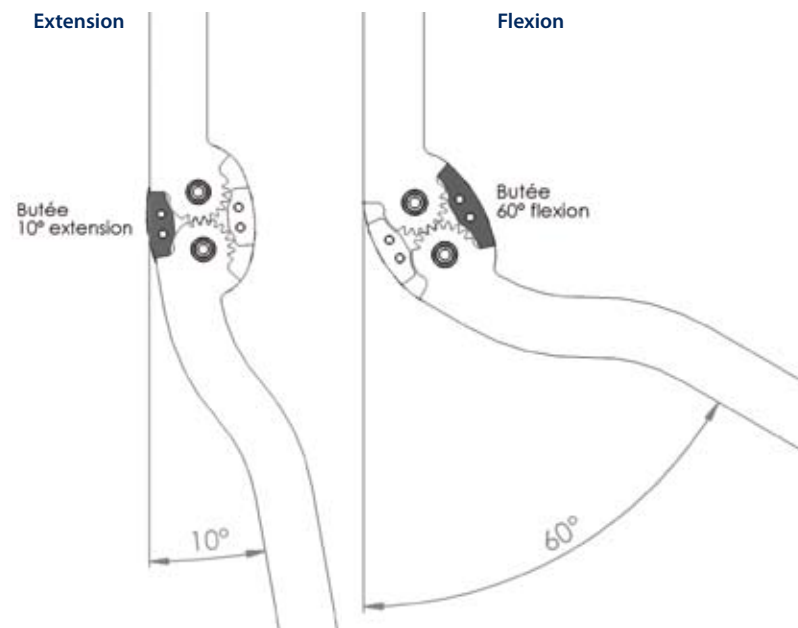

### Mise en place de la denture

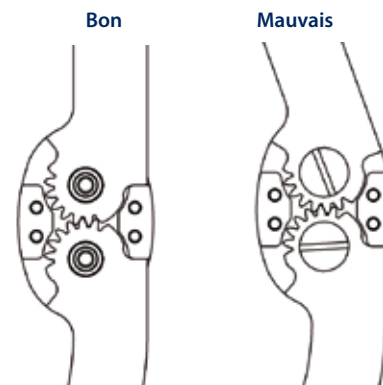

### Mise en place des butées

Lors du changement des butées, ajuster le serrage des vis (6) à votre convenance pour obtenir la résistance au pivotement voulue.

Les vis (6) doivent être montées au frein filet faible Z31-222 (LOCTITE 222).

L'articulation est immobilisée en positionnant les butées de 0° d'extension et de 0° de flexion.