



morpho  
SKIN®



Parement adhésif élastique  
pour la personnalisation  
des appareillages orthopédiques

Produit breveté  
Groupe G2M



1 Vérifier le sens des motifs et déterminer l'emplacement idéal de ces derniers.



10 Découper au scalpel l'excédent de matière, en prévoyant des crantages si nécessaire.




Une fois l'emplacement déterminé, marquer le milieu en faisant un pli dans le **morphoSKIN**®.



**8** Une fois la première partie collée, décoller le film protecteur de la deuxième moitié de votre forme et finaliser le collage.



**2** A l'aide de l'outil plotter (Réf. ZT91P), découper le film de protection. Prévoir suffisamment de marge pour les retours.

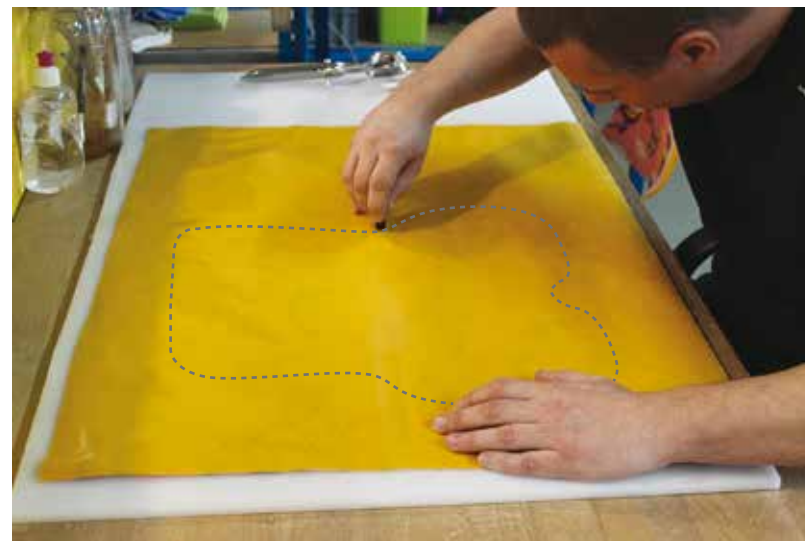

**9** Ajouter un filet de colle au pinceau (Réf. Z3301) sur les retours et sur les formes complexes si nécessaire.



**3** Découper la forme obtenue en deux.





4 Décoller une première moitié de la forme. Le reste du film de protection évitera que le **morphoSKIN®** se colle sur lui-même et empêchera également d'étendre trop la matière.



6 Plaquer / lisser la partie adhésive sans étirer la matière.



5 Placer le **morphoSKIN®** sur la forme à garnir. Veiller à bien centrer votre **morphoSKIN®**



7 Découper l'excédent de **morphoSKIN®** pour faciliter le travail de mise en place en laissant suffisamment de matière.

