

## Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les têtes doivent être utilisées suivant l'appréciation de l'orthoprothésiste agréé en fonction du patient à appareiller
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre de l'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié
- Veillez informer les utilisateurs et le patient au bon emploi du produit

## Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine (sur lequel est inscrit son numéro de lot)
- La fréquence des visites de contrôle de l'appareil reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller

## Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

*NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.*


## Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de fabricant, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 2007/47/CE.



## Désignation

Mât support de tête débrayable à coulisse réglable en hauteur, profondeur et en inclinaison (sans garniture).

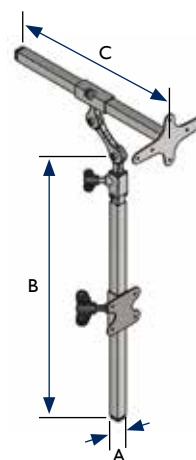

	T8J-1	T8J-2	T8J-3
A	∅ 12	∅ 16	∅ 20
B	410 mm	460 mm	490 mm
C	250 mm	300 mm	300 mm
Poids	600 g	950 g	1530 g

## Destination

Adjonction entrant dans la réalisation de coque de maintien du corps en position assise et debout pour patient polyhandicapé ou atteint de paralysie cérébrale.

## Compatibilité

Les têtiers sont compatibles avec l'intégralité des pièces JANTON de même section.  
Les têtiers se fixent sur toutes les coques thermoformées.


## Mise en place

La coulisse de la têtier se fixe dans le dos de la coque à la hauteur voulue.  
Le garnissage de la têtier est réalisé selon votre technique habituelle.


## Couple de serrage

	T8J-1		T8J-2		T8J-3	
Vis 6 pans (2)	Vis CHC M5	5 N.m	Vis CHC M6	8 N.m	Vis CHC M6	8 N.m


## Réglages

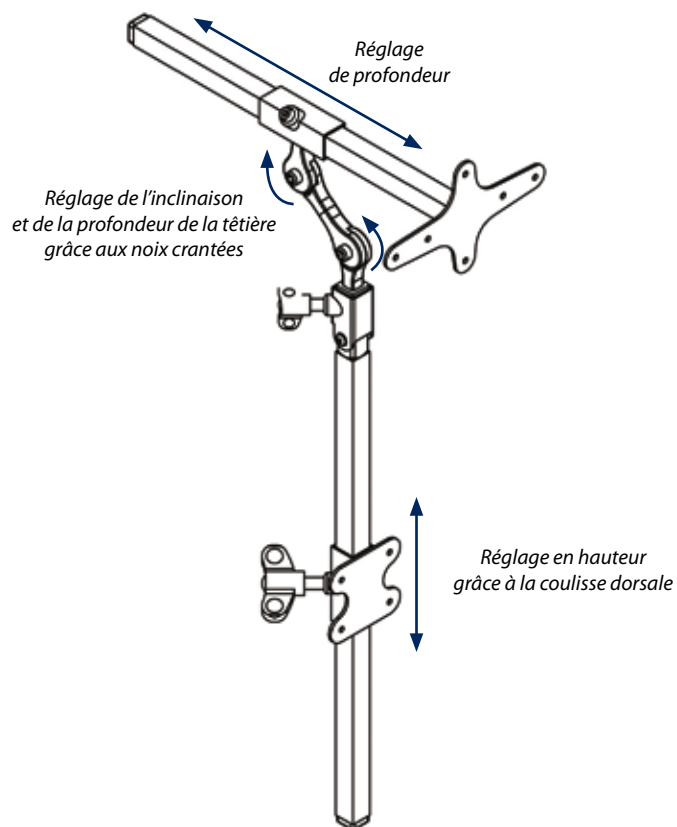

- En option, une butée de fin de course fixée sur le tube permet de conserver les réglages de hauteur.

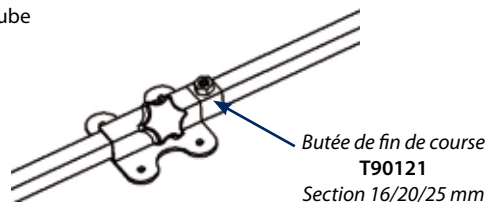

## Débrayage de la têtier

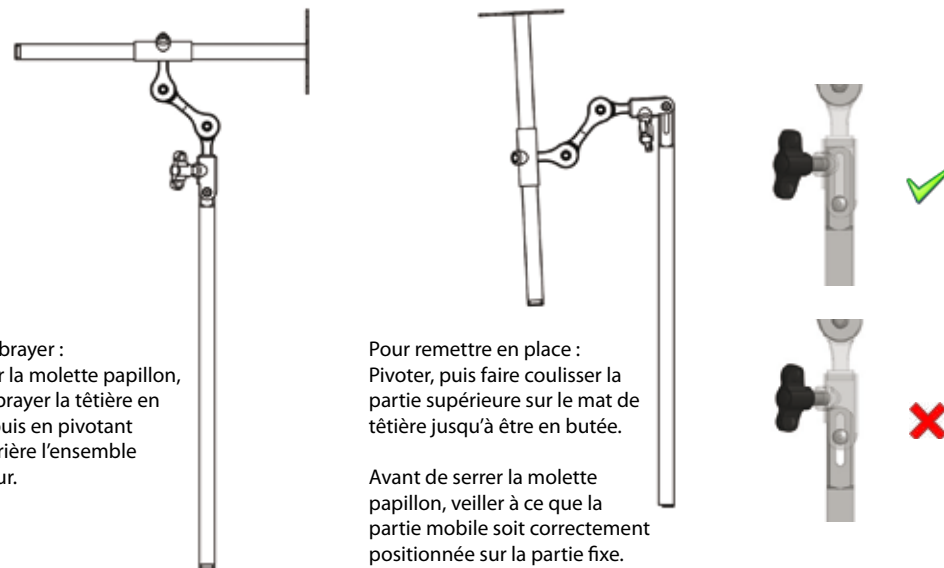


Pour débrayer :  
Dévisser la molette papillon,  
puis débrayer la têtier en  
levant puis en pivotant  
vers l'arrière l'ensemble  
supérieur.

Pour remettre en place :  
Pivoter, puis faire coulisser la  
partie supérieure sur le mat de  
têtier jusqu'à être en butée.

Avant de serrer la molette  
papillon, veiller à ce que la  
partie mobile soit correctement  
positionnée sur la partie fixe.

## Pièces détachées

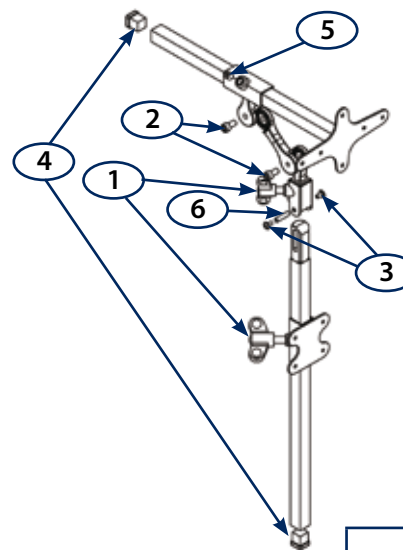

	T8J-1	T8J-2	T8J-3
1	Molette papillon	V30P-610	V30P-820
2	Vis 6 pans	V02Z-0510	V02Z-0612
3	Vis BHC	V06Z-0408	V06Z-0408
4	Embout plastique	V42-0812	V42-1216
5	Vis bout plat	V03Z-0608	V03Z-0808
6	Entretoise taraudé	V00331-051604	V00331-052004
			V00331-062504