

Hauteur et inclinaison de selle

Vis (12) pour la hauteur de selle.
Vis (2) et (4) pour l'angulation de selle.

	Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3
A (mm)	215/380	380/510	500/650	550/800
B (°)	65°/70°/80°/90°			

65° : inclinaison propice aux débutants.
70°/80°/90° : réglages à donner lorsque l'enfant cherche à se redresser dans ses déplacements.

Attention !
Pour assurer une parfaite stabilité lors des déplacements de l'enfant, l'angle de flexion de hanche ne doit pas dépasser 15°. Pour cela, régler correctement la hauteur de la selle.

Restriction d'utilisation / Précautions d'emploi

- Les châssis MOTILO doivent être utilisés dans les limites de poids et tailles conseillées
- Le patient ne doit pas être installé dans la selle lors du réglage de hauteur et d'inclinaison
- Nous recommandons l'utilisation de ce châssis en intérieur sur un sol lisse et plat sous la surveillance d'une tierce personne
- Nous recommandons l'utilisation de frein filet LOCTITE 243 (Z31-243) sur la visserie pour sécuriser les réglages
- La maintenance du produit reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste selon le cadre d'utilisation
- L'assemblage et l'ajustage doivent être effectués par un personnel qualifié

Entretien / Stockage

- Stocker le produit à l'abri de l'humidité
- La fréquence des visites de contrôle du châssis reste à l'appréciation de l'orthoprothésiste en fonction du patient à appareiller
- Pour l'entretien du châssis, ne pas utiliser de solvants

Garantie

La garantie est valable 1 an pour une utilisation conforme aux instructions du fabricant à partir de la date d'achat du produit.

NB : Pour toutes réclamations veuillez joindre un formulaire de retour dûment complété, tout formulaire incomplet ne pourra être traité.

Marquage CE

Groupe G2M déclare, en sa qualité de distributeur, que toutes ses pièces sont conformes à la directive 93/42/CE.

WWW.GROUPE-G2M.COM

NOTICE TECHNIQUE D'INSTRUCTION

MOTILO

Janton

Déambulation



TxxK

Désignation

Base roulante de déambulation disponible dans 4 tailles.

Tailles	Limite de taille	Limite de poids	Age (indicatif)
Taille 0 (T00K)	1,00 m	15 kg	3/5 ans
Taille 1 (T10K)	1,20 m	20 kg	4/6 ans
Taille 2 (T20K)	1,40 m	35 kg	7/12 ans
Taille 3 (T30K)	1,60 m	50 kg	Jeune adulte

Cette base est livrée avec son jeu de carters (montés), sa noix de fixation et sa barre de selle.

Coloris de châssis



Coloris de carter




Visuels non contractuels

Destination


Base roulante à équiper d'une selle sur mesure, destinée à assurer la déambulation d'enfants polyhandicapés ou atteints d'infirmités motrices cérébrales.

Compatibilités

Cette base roulante équipée d'une selle sur mesure peut être utilisée avec les accessoires suivants :

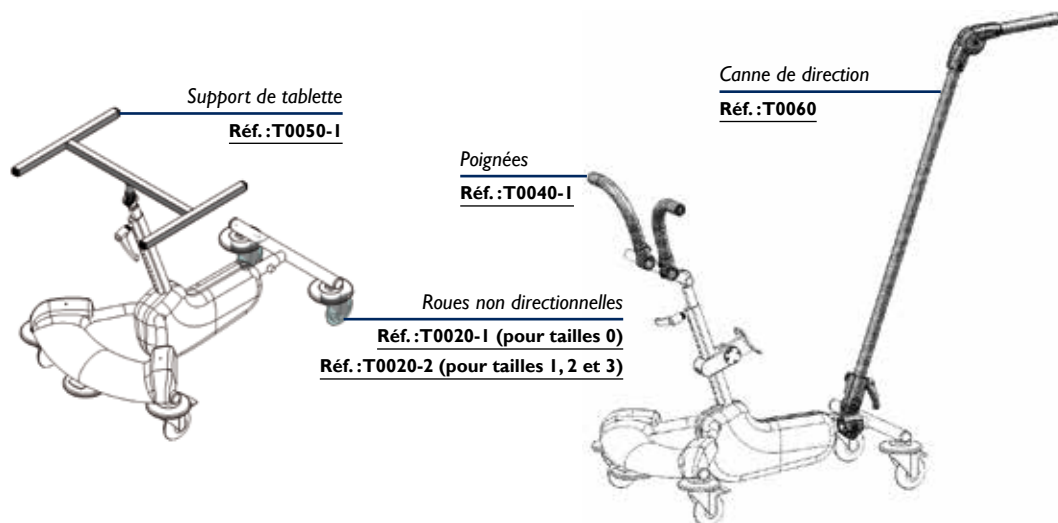

Pièces détachées

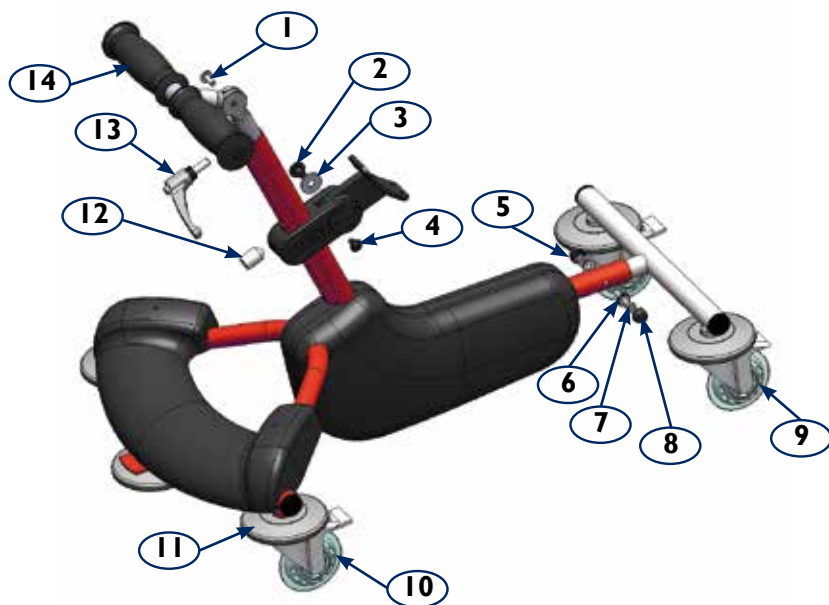

		Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3
1	Vis d'angulation guidon	V06-0616			
2	Vis d'arrêt	V06-0812			
3	Rondelle	V20Z-082402			
4	Vis angulation noix	V06-0612			
5	Ecrou frein	V08F-6			
6	Rondelle clipsable	V39A-6			
7	Vis blocage train arrière	V12-635		V12-640	
8	Bouchon clipsable	V39B6			
9	Roulette libre	T608011-TR		T108011-TR	
10	Roulette frein	T608010-TR		T108010-TR	
11	Butoir	T108012			
12	Vis pointeau	V03P-1625		V03P-1630	
13	Poignée de réglage hauteur	V31-820			
14	Poignée de guidon	T108015			

Réglages

Empattement / Guidon

Poignée (13) pour la hauteur du guidon.

Vis (1) pour l'inclinaison du guidon.

Vis (7) pour ajuster la profondeur du train arrière.

