

Groupe G2M



CATALOGUE ALPS

INDEX

SYMBOLES DES PRODUITS	2
VUE D'ENSEMBLE DES MANCHONS	4
VUE D'ENSEMBLE DES GAINES	6
SÉLECTIONNER LA BONNE TAILLE DE MANCHONS	7
SÉLECTIONNER LA BONNE TAILLE DE GENOUILLÈRE DE SUSPENSION	7
<u>MANCHONS</u>	9
<u>GENOUILLÈRES DE SUSPENSION</u>	20
<u>ACCROCHAGES</u>	24
<u>EXTRAS</u>	25
<u>SOINS</u>	28
GARANTIE	30

SYMBOLES DES PRODUITS

MATÉRIAUX



EASYGEL : Effet talqué, contenant des antioxydants aidant au soin de l'état cutané et de la cicatrisation. Idéal pour les patients diabétiques avec une peau sensible blessant facilement ou présentant des irritations.



GRIPGEL : Effet adhérent aidant à réduire les efforts d'échauffement et de cisaillement, et favorisant une très bonne suspension. Idéal pour les peaux saines.



HAUTE DENSITE (HD) : Combinaison du confort du copolymère et de la nervosité du silicone. Idéal pour les patient actifs / sportifs souhaitant un confort supérieur au silicone, tout en gardant un bon contrôle de leur prothèse.



RESPECTUEUX POUR LA PEAU

SUSPENSION



LOCKING



CUSHION



COLERETTE

FABRICATION




Tissu tricoté **sans couture** avec des fils de haute qualité.



Tissu noir avec **stretch vertical très réduit**.



Tissu marron avec **élasticité verticale réduite**.

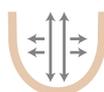

Tissu beige avec **stretch horizontal et vertical**.

NIVEAU D'ACTIVITÉ



K1 : activité faible



K2 : activité faible / moyenne



K3 : activité moyenne / élevée



K4 : activité élevée / sportif



VUE D'ENSEMBLE DES MANCHONS

NOM	RÉF	TYPES	MATÉRIAUX	ÉPAISSEUR	DISPONIBILITÉ
	Extreme Liner	XA38	  HD Gel Grip Gel	3 ou 6 mm uniforme	en stock
	Black Liner Topered	XA41	  Grip Gel	tapered 6 mm ant 3 mm post	en stock
	Skin Liner	XA44	  HD Gel	3 ou 6 mm uniforme	en stock
	EasyLiner	XA35	  Easy Gel	3 ou 6 mm uniforme ou 6/3 mm distal proximal tapered	en stock
	EasyLiner Super Stretch	XA35	  Easy Gel	6 mm uniforme	sur commande
	Easy Flex Liner	XA39	  Easy Gel	3 ou 6 mm uniforme	en stock

NOM	RÉF	TYPES	MATÉRIAUX	ÉPAISSEUR	DISPONIBILITÉ
	Smart Seal Liner	XA43	  HD Gel	3 ou 6 mm uniforme	en stock
	Generic Liner	XA36	  Grip Gel	3 ou 6 mm uniforme	en stock
	Flex Seal Liner	XA46	  HD Gel	6 mm ou 6/3 mm tapered cushion	sur commande
	Black Liner HD	XA42	  HD Gel  Grip Gel	3 ou 6 mm uniforme	en stock
	Silicone Pro Liner	XA45	  Skin Friendly	3 mm uniforme	sur commande

VUE D'ENSEMBLE DES GAINES

NOM	RÉF	TYPES	MATÉRIAUX	ÉPAISSEUR	DISPONIBILITÉ
 Supérieure Sleeve	XA34SFB		 HD Gel  Grip Gel	2 mm uniforme	en stock
 Easy Sleeve	XA32FR		 Easy Gel	3 mm uniforme	en stock
 Flex Sleeve	XA34SFX XA34SFXBE		 HD Gel	3 mm uniforme prefléchiée	en stock
 Easy Sleeve Super Stretch	XA32		 Easy Gel	6 mm uniforme	sur commande


SÉLECTIONNER LA BONNE TAILLE DE MANCHON

Faire un repère sur le membre résiduel à 6 cm de l'extrémité distale.

Mesurer la circonférence du membre résiduel à ce repère.

Utiliser cette mesure pour sélectionner la bonne taille de manchon à l'aide du tableau ci-joint.

(Si votre mesure tombe entre deux tailles, choisissez la taille inférieure.)

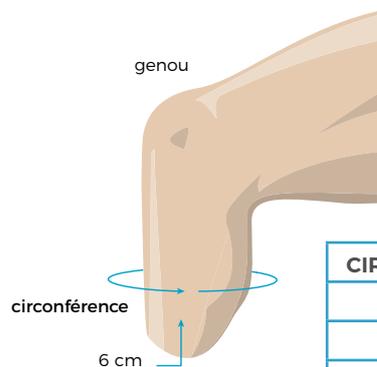


CIRCONFÉRENCE	TAILLE
16 - 19 cm	16
20 - 23 cm	20
24 - 25 cm	24
26 - 27 cm	26
28 - 31 cm	28
32 - 37 cm	32
38 - 43 cm	38
44 - 52 cm	44

SÉLECTIONNER LA BONNE TAILLE DE GENOUILLÈRE DE SUSPENSION

Faire un repère sur la cuisse à 10 cm au-dessus de la rotule.

Mesurer la circonférence de la cuisse à ce repère.

Utiliser cette mesure pour sélectionner la bonne taille de genouillère.

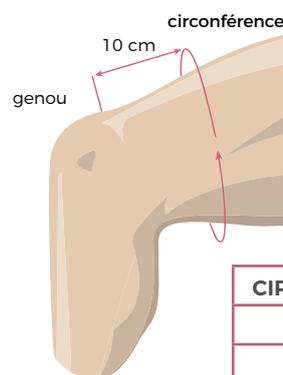

CIRCONFÉRENCE	TAILLE
20-24 cm	16
25-30 cm	20
31-34 cm	24
35-37 cm	26
38-40 cm	28
41-45 cm	32
46-60 cm	38
61-70 cm	44

SFX Flex Sleeve	
CIRCONFÉRENCE	TAILLE
20-34 cm	20
31-40 cm	26
35-60 cm	32

Ex 1 : pour une circonférence de 31 cm, sélectionnez une taille 20 ou 26.

Ex 2 : pour une circonférence de 50 cm, sélectionnez une taille 32.

EXTRÊME LINER

XA38 (AKDT / AKFR)

L'Extrême Liner est un manchon en gel de copolymère spécialement conçue pour les amputés transtibiaux et transfémoraux actifs.

Il est conçu GRIP GEL pour répondre aux besoins de la plupart des patients.

L'Extrême Liner réduit de 80% l'étirement vertical par rapport aux autres manchons grâce à son textile de recouvrement anti-pistonnement, cela permet plus de contrôle et de stabilité.

Caractéristiques et applications :

- Conçu en GRIP gel, son caractère collant aide à réduire les échauffements dus aux mouvements. Idéal pour les amputés dont les tissus cutanés sont sains.
- L'étirement vertical limité réduit le mouvement des tissus cutanés et offre un meilleur contrôle de la prothèse
- Ajustement circonférentiel élevé pour faciliter l'ajustement de la forme.
- La cupule distale en version locking est proportionnelle à la taille du manchon pour faciliter la mise en place.
- Pour les amputés transtibiaux, transfémoraux avec une activité modérée à actifs.

TAILLE	LOCKING	CUSHION
16-19 cm	XA38(DTZ ou DT)16	XA38(FRZ ou FR)16
20-23 cm	XA38(DTZ ou DT)20	XA38(FRZ ou FR)20
24-25 cm	XA38(DTZ ou DT)24	XA38(FRZ ou FR)24
26-27 cm	XA38(DTZ ou DT)26	XA38(FRZ ou FR)26
28-31 cm	XA38(DTZ ou DT)28	XA38(FRZ ou FR)28
32-37 cm	XA38(DTZ ou DT)32	XA38(FRZ ou FR)32
38-43 cm	XA38(DTZ ou DT)38	XA38(FRZ ou FR)38
44-52 cm	XA38(DTZ ou DT)44	XA38(FRZ ou FR)44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.


Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.



CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ

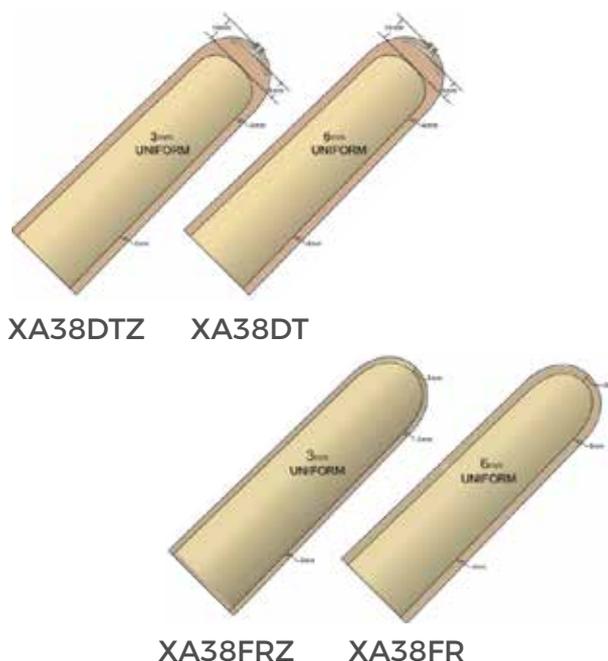

BLACK LINE TAPERED

XA41 (APDT-TP / APFR-TP)

Le **Black Line Tapered** est affiné de la partie antérieure vers la partie postérieure du manchon pour offrir un confort supérieur à vos patients. Cela permet une plus grande facilité de flexion de genou et moins de contrainte et de plis dans la région poplitée.

Il est disponible en version "locking" pour accrochage distale ou en version "cushion" pour accrochage par genouillère de suspension.

Fabriqué avec le tissu "BLACK" haute performance et le GRIP GEL pour réduire les plis dans la région poplitée.

Caractéristiques :

- Tapered : 6 mm antérieur à 3 mm postérieur.
- Réduit les contraintes dans la région poplitée.
- Tissu noir haute performance.
- Pour les amputés transtibiaux avec une activité modérée à sportif.
- La cupule distale en version locking est proportionnelle à la taille du manchon pour faciliter la mise en place.

TAILLE	LOCKING	CUSHION
20-23 cm	XA41DT20	XA41FR20
24-25 cm	XA41DT24	XA41FR24
26-27 cm	XA41DT26	XA41FR26
28-31 cm	XA41DT28	XA41FR28
32-37 cm	XA41DT32	XA41FR32

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.


Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.



CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ

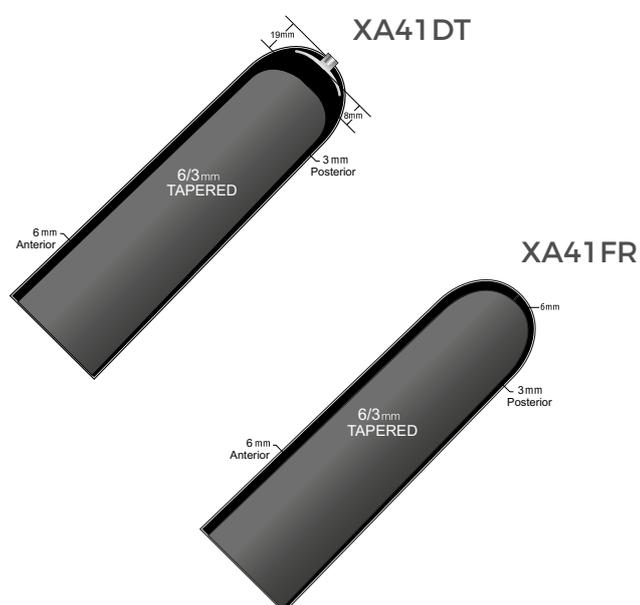

SKIN LINER

XA44 (ECDTHD / ECFRHD)

Le **Skin Liner** présente une nouvelle construction réduisant l'étirement distale du manchon pour contrôler l'effet de pistonnement.

En utilisant moins d'énergie pour sa fabrication le skin liner est un produit plus éco-responsable.

Le nouveau revêtement du Skin Liner est tricoté d'un seul tenant et donc sans couture.

Il est disponible en version "locking" pour accrochage distale ou en version "cushion" pour accrochage par genouillère de suspension.

Fabriqué en Gel copolymère haute densité, pour fournir aux amputés actifs un meilleur degré de contrôle proche du silicone, en gardant le confort du copolymère.

Caractéristiques et applications :

- Nouvelle construction anti-élongation.
- Gel copolymère Haute Densité (HD) pour un contrôle et un confort accru.
- Disponible en épaisseur uniforme de 3 mm et 6 mm.

TAILLE	LOCKING	CUSHION
16-19 cm	XA44(DTZ ou DT)16	XA44(FRZ OU FR)16
20-23 cm	XA44(DTZ ou DT)20	XA44(FRZ OU FR)20
24-25 cm	XA44(DTZ ou DT)24	XA44(FRZ OU FR)24
26-27 cm	XA44(DTZ ou DT)26	XA44(FRZ OU FR)26
28-31 cm	XA44(DTZ ou DT)28	XA44(FRZ OU FR)28
32-37 cm	XA44(DTZ ou DT)32	XA44(FRZ OU FR)32
38-43 cm	XA44(DTZ ou DT)38	XA44(FRZ OU FR)38

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.


Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.



CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ

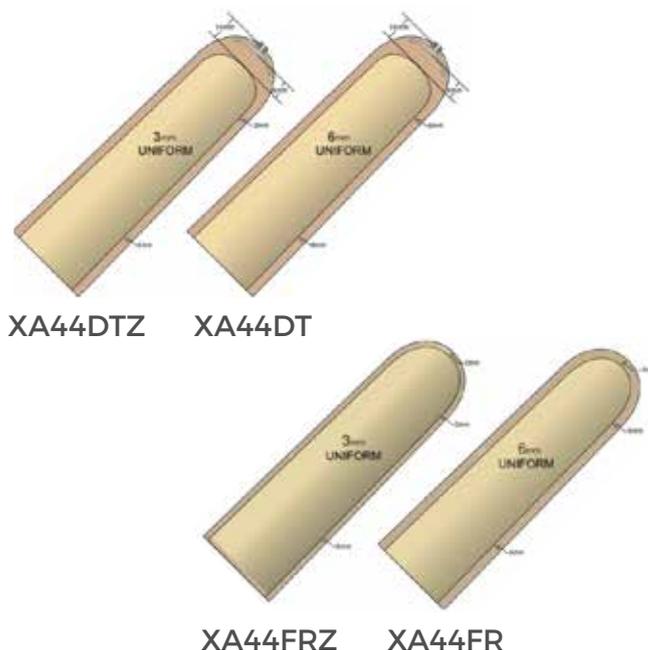

EASY LINER

XA35 (ELDT / ELFR)

L'Easy Liner est un manchon en gel de copolymère contenant des antioxydants avec des effets bénéfiques pour la peau.

L'EasyGel offre le confort attendu par vos patients, tout en alliant résistance et élasticité.

C'est notre choix recommandé pour les patients diabétiques ou patients ayant la peau fragile.

Caractéristiques et applications :

- Le tissu haute performance pour une meilleure durabilité.
- Contient un antioxydant pour les moignons à la peau délicate.
- Le faible coefficient de friction limite les efforts de cisaillement sur la peau.
- Disponible en version 3 ou 6 mm, avec ou sans accrochage distale en stock, mais aussi en version affiné de 6 mm en partie distale à 3 mm en partie proximale uniquement sur commande.

EN STOCK



CARACTÉRISTIQUES




NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE	LOCKING	CUSHION	AFFINÉ (SUR COMMANDE)
16-19 cm	XA35(DTZ ou DT)16	XA35(FRZ OU FR)16	XA35(DT OU FR)TP16
20-23 cm	XA35(DTZ ou DT)20	XA35(FRZ OU FR)20	XA35(DT OU FR)TP20
24-25 cm	XA35(DTZ ou DT)24	XA35(FRZ OU FR)24	XA35(DT OU FR)TP24
26-27 cm	XA35(DTZ ou DT)26	XA35(FRZ OU FR)26	XA35(DT OU FR)TP26
28-31 cm	XA35(DTZ ou DT)28	XA35(FRZ OU FR)28	XA35(DT OU FR)TP28
32-37 cm	XA35(DTZ ou DT)32	XA35(FRZ OU FR)32	XA35(DT OU FR)TP32
38-43 cm	XA35(DTZ ou DT)38	XA35(FRZ OU FR)38	XA35(DT OU FR)TP38
44-52 cm	XA35(DTZ ou DT)44	XA35(FRZ OU FR)44	XA35(DT OU FR)TP44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.

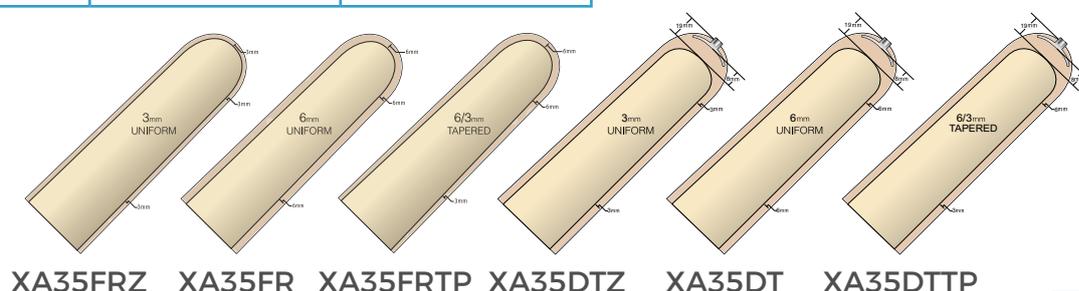

EASY LINER SUPERSTRETCH

XA35 (ELPX)

L'Easy Liner Superstretch est un manchon en gel de copolymère Easygel contenant des antioxydants avec des effets bénéfiques pour la peau.

Il allie confort, résistance et élasticité grâce à l'EasyGel. Sans tissu de recouvrement, ce manchon permet une liberté totale de mouvement, ainsi qu'un contact supérieur avec la peau sans restreindre les flux circulatoires.

L'Easy Liner Superstretch profite également d'un coefficient de frottement plus faible que l'on trouve uniquement avec l'EasyGel, permettant à la peau d'être soulagée des forces de cisaillement.

Caractéristiques et applications :

- Ajustement plus précis et meilleur contact.
- Contient un antioxydant pour les peaux délicates.
- Disponible en épaisseur uniforme de 6 mm.
- Manchon plus long pour correspondre à la plupart des patients.

TAILLE	CUSHION
16-19 cm	XA3516
20-23 cm	XA3520
24-25 cm	XA3524
26-27 cm	XA3526
28-31 cm	XA3528
32-37 cm	XA3532

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.



CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ



EASYFLEX LINER

XA39 (EZF)

L'Easyflex Liner facilite la flexion du genou par une souplesse d'étirement de la partie antérieure.

En partie postérieure, le tissu limite de 80% l'étirement vertical, ce qui réduit les plis dans la région poplitée.

Conçu en EasyGel contenant des antioxydants avec des effets bénéfiques pour la peau, il préservera le bon état cutané des membres résiduels tout en apportant du confort et de la durabilité.

Caractéristiques et applications :

- Deux types de tissu avec une élasticité différente pour faciliter la flexion de genou.
- La cupule distale est proportionnelle à la taille du manchon pour faciliter le chaussage.
- Contient des antioxydants pour une utilisation sur les peaux délicates.
- Existe en 6mm avec accrochage distal.

TAILLE	LOCKING
16-19 cm	XA39(DTZ ou DT)16
20-23 cm	XA39(DTZ ou DT)20
24-25 cm	XA39(DTZ ou DT)24
26-27 cm	XA39(DTZ ou DT)26
28-31 cm	XA39(DTZ ou DT)28
32-37 cm	XA39(DTZ ou DT)32
38-43 cm	XA39(DTZ ou DT)38
44-52 cm	XA39(DTZ ou DT)44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.


EN STOCK




CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ

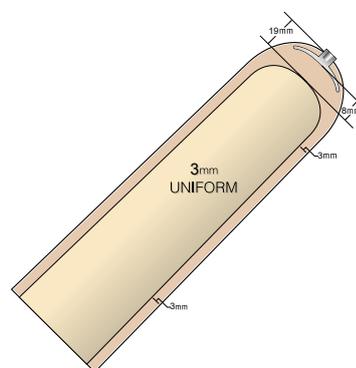

XA39DTZ

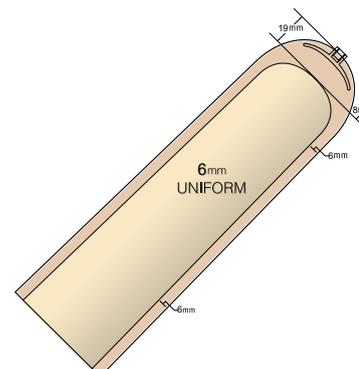

XA39DT

SMART SEAL LINER

XA43 (SAFR / SBFR)

Le **Smart Seal Liner** est un manchon à lèvres d'étanchéité pour une suspension sécurisée par vide d'air.

Conçu en gel de copolymère Haute Densité (HD), il fournit aux amputés actifs un meilleur contrôle, proche du silicone, en gardant le confort du copolymère.

La souplesse des lèvres d'étanchéité permet une excellente coaptation contre la paroi de l'emboiture, tandis que la construction dans le corps du manchon permet une adaptation parfaite sur le membre résiduel.

Fabriqué avec nouveau revêtement sans couture, le Smart Seal Liner est tricoté d'un seul tenant pour limiter les tensions et possède un coloris moderne.

Caractéristiques et applications :

Disponible en deux versions, fémorale et tibiale, pour une hauteur de collerette adapté au niveau d'amputation :

- Tibiale : 8 cm de l'extrémité distale,
- Fémorale : 12 cm de l'extrémité distale.

TAILLE	TIBIALE	FÉMORALE
20-23 cm	XA43(BFR ou BFRZ)20	
24-25 cm	XA43(BFR ou BFRZ)24	
26-27 cm	XA43(BFR ou BFRZ)26	XA43AFRZ26
28-31 cm	XA43(BFR ou BFRZ)28	XA43AFRZ28
32-37 cm		XA43AFRZ32
38-43 cm		XA43AFRZ38

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.


Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.



CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ

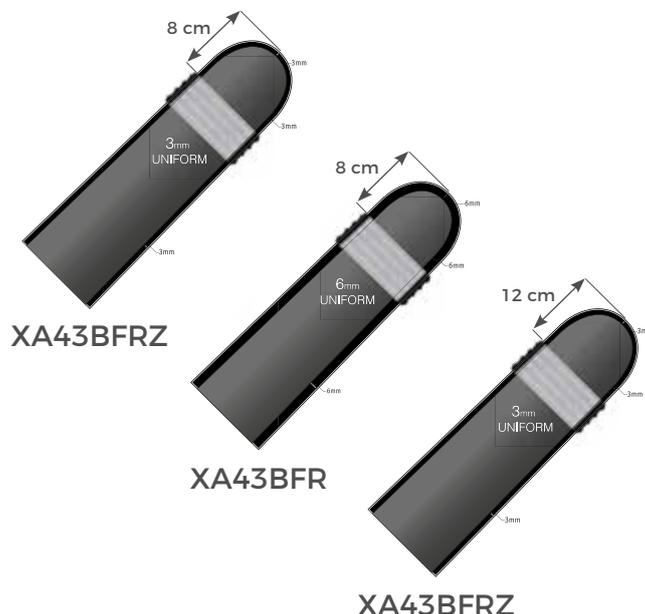

GENERIC LINER

XA36 (GPDT / GPFR)

Le **Generic liner** est un manchon polyvalent conçu en GRIP GEL, alliant confort, résistance et élasticité.

L'élasticité supérieure de ce manchon prothétique ne restreint pas la circulation sanguine dans le membre résiduel du patient.

De plus, grâce à son textile de recouvrement, il est facile à enfiler et à retirer pour le patient, en particulier pour les personnes âgées ayant des difficultés de préhension.

Caractéristiques et applications :

- Le Grip Gel aide à la bonne suspension de la prothèse grâce à une bonne adhérence réduisant ainsi les efforts de frottements.
- Le tissu haute performance garantit une meilleure durabilité.
- La cupule distale est proportionnelle à la taille du manchon pour faciliter le chaussage.
- Manchon universel, recommandé également pour les patients gériatriques avec un état cutané sain.



CARACTÉRISTIQUES




NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE	LOCKING	CUSHION
16-19 cm	XA36(DTZ ou DT)16	XA36(FRZ OU FR)16
20-23 cm	XA36(DTZ ou DT)20	XA36(FRZ OU FR)20
24-25 cm	XA36(DTZ ou DT)24	XA36(FRZ OU FR)24
26-27 cm	XA36(DTZ ou DT)26	XA36(FRZ OU FR)26
28-31 cm	XA36(DTZ ou DT)28	XA36(FRZ OU FR)28
32-37 cm	XA36(DTZ ou DT)32	XA36(FRZ OU FR)32
38-43 cm	XA36(DTZ ou DT)38	XA36(FRZ OU FR)38
44-52 cm	XA36(DTZ ou DT)44	XA36(FRZ OU FR)44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.

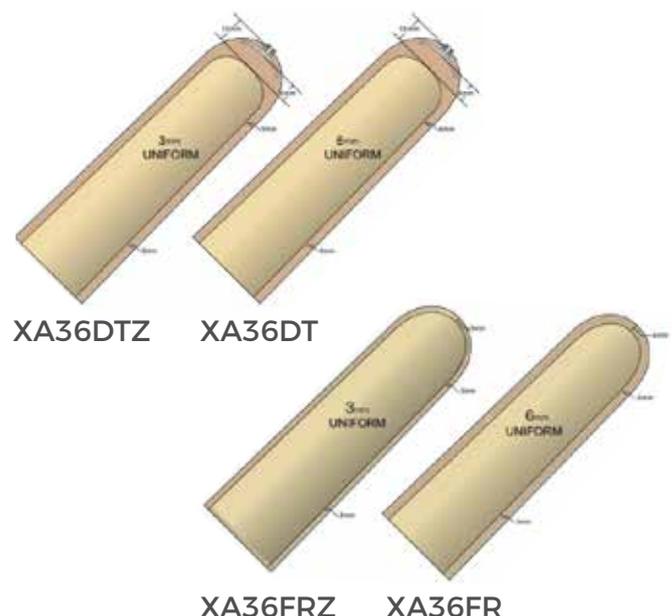

FLEXSEAL LINER

XA46 (PSI)

Le **Flexseal Liner** permet d'avoir une étanchéité de la genouillère de suspension sur le manchon, au plus proche des découpes de l'emboîture.

Le revêtement en tissu situé en partie distale permet à l'air de s'échapper de la prothèse.

Conçu en EasyGel, il offre confort et durabilité.

Le PSI peut être utilisé avec une valve classique ou un système de dépressurisation

Caractéristiques et applications :

- Facilité d'étanchéité pour la genouillère de suspension grâce à la partie supérieure non revêtue.
- Le tissu de recouvrement en partie distale permet de drainer l'air à l'intérieur de l'emboîture.
- Le manchon fonctionne avec les systèmes à dépressurisation comme les valves classiques.
- L'EasyGel contient des antioxydants pour une utilisation sur les peaux délicates.



CARACTÉRISTIQUES




NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE	CUSHION	TAPERED
16-19 cm	XA46FR16	XA46TP16
20-23 cm	XA46FR20	XA46TP20
24-25 cm	XA46FR24	XA46TP24
26-27 cm	XA46FR26	XA46TP26
28-31 cm	XA46FR28	XA46TP28
32-37 cm	XA46FR32	XA46TP32
38-43 cm	XA46FR38	XA46TP38
44-52 cm	XA46FR44	XA46TP44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.

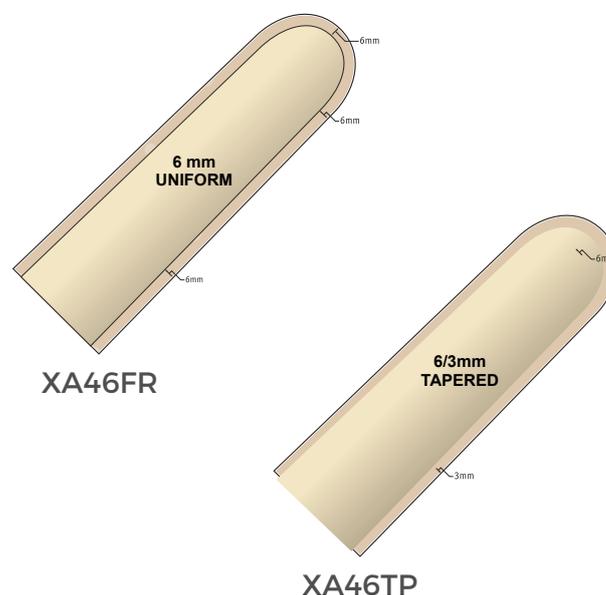

BLACK LINER HD

XA42 (SPDTHD / SPFRHD)

Le **Black Liner HD** est idéal pour les patients actifs souhaitant du confort tout en gardant un très bon contrôle de leur prothèse.

Il dispose d'un tissu de recouvrement noir haute performance très résistant, qui garantit par ailleurs confort et stabilité.

Ce manchon est disponible en version accrochage distale ou cushion, et en 2 épaisseurs : 3 ou 6 mm.

Caractéristiques et applications :

- Tissu haute performance pour un contrôle accru de la prothèse.
- Conçu avec du gel haute densité HD idéal pour les amputés actifs et les patients souhaitant plus de confort par rapport à un manchon en silicone.
- Étirement circonférentiel élevé pour faciliter l'ajustement de la forme.



CARACTÉRISTIQUES




NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE	LOCKING	CUSHION
16-19 cm	XA42(DTZ ou DT)16	XA42(FRZ OU FR)16
20-23 cm	XA42(DTZ ou DT)20	XA42(FRZ OU FR)20
24-25 cm	XA42(DTZ ou DT)24	XA42(FRZ OU FR)24
26-27 cm	XA42(DTZ ou DT)26	XA42(FRZ OU FR)26
28-31 cm	XA42(DTZ ou DT)28	XA42(FRZ OU FR)28
32-37 cm	XA42(DTZ ou DT)32	XA42(FRZ OU FR)32
38-43 cm	XA42(DTZ ou DT)38	XA42(FRZ OU FR)38
44-52 cm	XA42(DTZ ou DT)44	XA42(FRZ OU FR)44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.

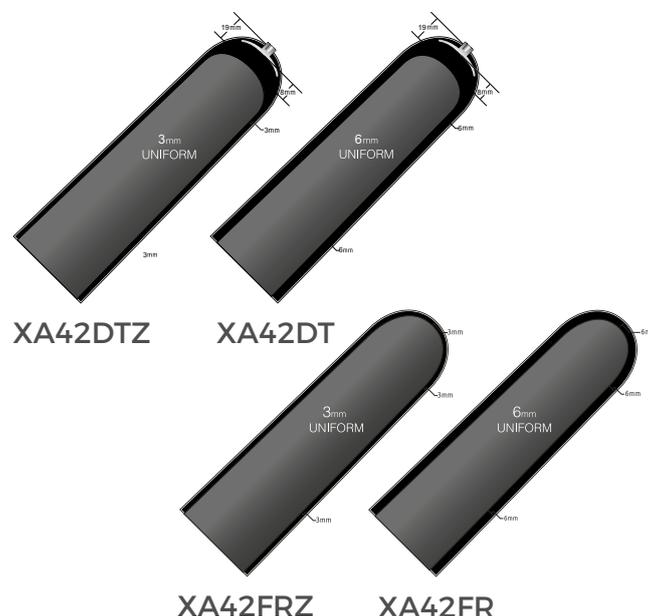

SILICONE PRO LINER

XA45 (LSC / LSL)

Le **Silicone Pro Liner** est le nouveau manchon en silicone ALPS Pro. Il est conçu avec un revêtement sans couture en tissu tricoté qui facilite l'enfilage et le retrait.

La matrice anti-élongation sur la version accrochage distale limite les efforts de pistonnement et assure une meilleure stabilité pour tous les niveaux d'activité.

Caractéristiques et applications :

- Disponible en version accrochage distale ou cushion en 3 mm d'épaisseur.
- Silicone doux pour la peau et profil affiné.
- Pistonnement réduit, moins de contraintes distales.
- Revêtu de tissu tricoté sans couture pour une liberté de mouvement accrue.
- Léger.
- Épaisseur distale de 4,5 mm pour plus de confort.

TAILLE	LOCKING	CUSHION
14-17 cm	XA45DT14	XA45FR14
16-19 cm	XA45DT16	XA45FR16
18-21 cm	XA45DT18	XA45FR18
20-23 cm	XA45DT20	XA45FR20
22-25 cm	XA45DT22	XA45FR22
24-25 cm	XA45DT24	XA45FR24
26-27 cm	XA45DT26	XA45FR26
28-31 cm	XA45DT28	XA45FR28
30-33 cm	XA45DT30	XA45FR30
32-37 cm	XA45DT32	XA45FR32
35-37 cm	XA45DT35	XA45FR35
38-47 cm	XA45DT38	XA45FR38
44-53 cm	XA45DT44	XA45FR44

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm de l'extrémité distale.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille du manchon.


SUR COMMANDE



CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ

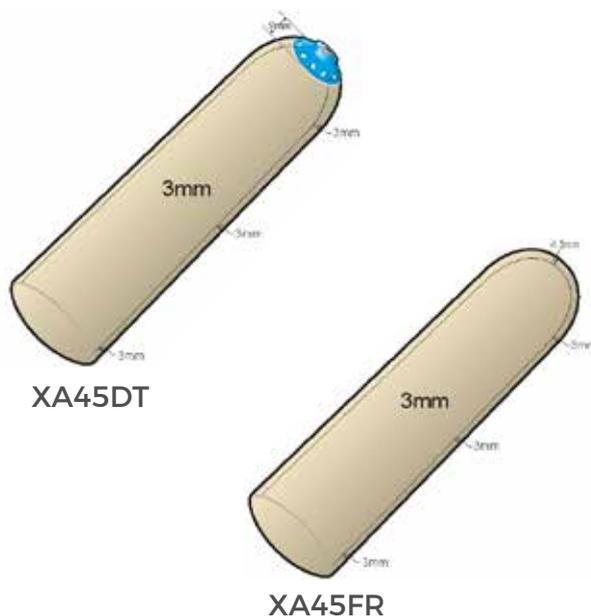



SUPÉRIEURE SLEEVE

XA34SFB (SFB / SFBHD)

La **Supérieure Sleeve (SFB)** apporte un confort supérieur fourni par le GripGel.

Elle dispose d'un tissu tricoté noir qui permet au patient une excellente liberté de flexion du genou.

La SFB permet également une suspension sûre grâce à sa très bonne adhérence, sans restreindre la circulation, tout en minimisant les efforts de cisaillements.

Grâce à un profil affiné, la SFB est un choix idéal pour les patient cherchant moins d'épaisseur.

Caractéristiques et applications :

- Conçu avec du GripGel pour une meilleure suspension.
- Profil affiné, épaisseur uniforme de 2 mm.
- Liberté de flexion du genou et solidité.
- Fournit une suspension sécurisée.




CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE	2 MM
25-30 cm	XA34SFB20
31-34 cm	XA34SFB24
35-37 cm	XA34SFB26
38-40 cm	XA34SFB28
41-45 cm	XA34SFB32

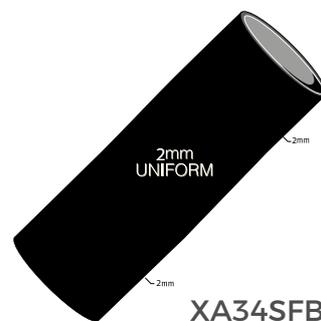

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm au-dessus du centre du genou.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille de la gaine.

EASY SLEEVE

XA32FR (SFR)

L'Easy Sleeve (SFR), genouillère de suspension prothétique, procure un confort supérieur grâce à l'effet talqué de l'EasyGel.

L'élasticité du tissu permet au patient une excellente liberté de flexion du genou.

La SFR permet également une suspension sûre grâce à une adhérence non agressive avec la peau, sans restreindre la circulation.

Par ailleurs, le coefficient plus faible de la friction trouvée avec l'EasyGel aide à soulager la peau des efforts de cisaillement.

Caractéristiques et applications :

- Tissu de recouvrement solide et facilitant le glissement lors du chaussage.
- Souplesse et liberté de flexion du genou.
- Gel effet talqué contenant un antioxydant pour une utilisation sur peau délicate.
- Réduit la compression ainsi que l'irritation proximale.
- 3mm d'épaisseur.




CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE	3 MM
25-30 cm	XA32FR20
31-34 cm	XA32FR24
35-37 cm	XA32FR26
38-40 cm	XA32FR28
41-45 cm	XA32FR32
46-60 cm	XA32FR38
61-70 cm	XA32FR44

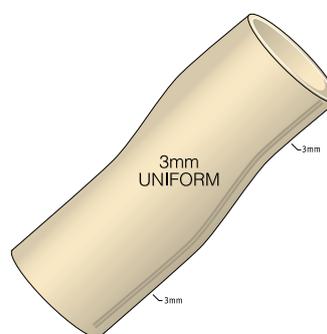

XA32FR

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm au-dessus du centre du genou.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille de la gaine.

FLEX SLEEVE

XA34SFX (SFX)

La **Flex Sleeve (SFX)** est une genouillère de suspension prothétique avec une construction tricotée sans couture et en gel haute densité (HD) pour fournir un maximum de confort et de durabilité.

Le SFX a une pré-flexion de 30° qui facilite la flexion et réduit les plis dans la région poplitée.

Idéale pour les patients actifs comme pour les patients restant en position assise sur des périodes prolongées. La construction 3D du tissu de recouvrement lui permet de réduire les efforts rotuliens.

Caractéristiques et applications :

- Pré-flexion de 30°.
- Le Gel HD offre aux amputés actifs un grand degré de contrôle et de sécurité.
- Disponible en épaisseur uniforme de 3 mm et en 2 coloris : beige ou noir.
- Disponible en une longueur qui convient à la plupart des utilisateurs, possibilité d'ajustement en recoupant la longueur dans les parties supérieures et inférieures.


TAILLE	3 MM NOIRE	3 MM BEIGE
30-34 cm	XA34SFX20	XA34SFXBE20
31-40 cm	XA34SFX26	XA34SFXBE26
35-60 cm	XA34SFX32	XA34SFXBE32

Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm au-dessus du centre du genou.


Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille de la gaine.



CARACTÉRISTIQUES

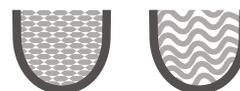

NIVEAU D'ACTIVITÉ

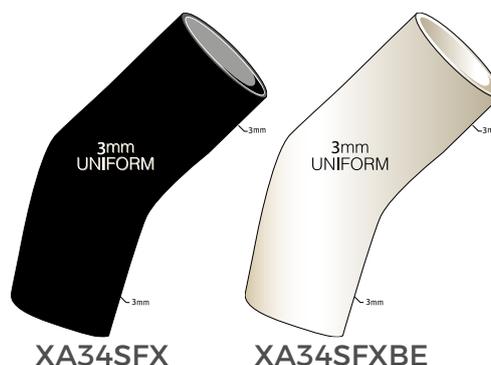

EASY SLEEVE SUPERSTRETCH

XA32 (SLE)

La genouillère EasySleeve SuperStretch allie confort, résistance et élasticité grâce au gel de copolymère EasyGel. L'absence de tissu de recouvrement garantit une liberté.

La SLE permet une liberté de flexion du genou ainsi qu'une sécurité de suspension en adhérant avec la peau. Cela sans restreindre la circulation, tout en réduisant les efforts contre la rotule.

Caractéristiques et applications :

- Minimise la compression et l'irritation proximale.
- Plus longue pour une plus grande adaptabilité et pouvant être recoupé à la longueur voulue.
- Contient un antioxydant pour une utilisation sur les peaux sensibles.
- Recommandé pour les prothèses de bain.



CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE	6 MM
16-19 cm	XA3216
20-23 cm	XA3220
24-25 cm	XA3224
26-27 cm	XA3226
28-31 cm	XA3228
32-37 cm	XA3232



Mesurer la circonférence de la jambe 10 cm au-dessus du centre du genou.

Voir page 7 pour plus d'informations sur la sélection de la taille de la gaine.

ACCROCHAGE DISTAL AVEC PYRAMIDE

XA10 (S498)

L'accrochage distal Alps avec ou sans pyramide, ou en version platine est conçu en nylon ce qui lui confère une meilleure durabilité.

L'engrenage unidirectionnel pratique permet à l'utilisateur de s'aider au chaussage dans l'emboîture en tournant le bouton.


Le système présente une fonction très importante : si le système se trouve bloqué par la présence de corps étrangers non désirables pris dans l'engrenage, le système de verrouillage peut être totalement retiré en libérant le plongeur, ainsi le patient peut déchausser sans difficultés.

Kit de montage XA10F



pour les références XA10K, XA10N, XA10KP

Détails du kit :

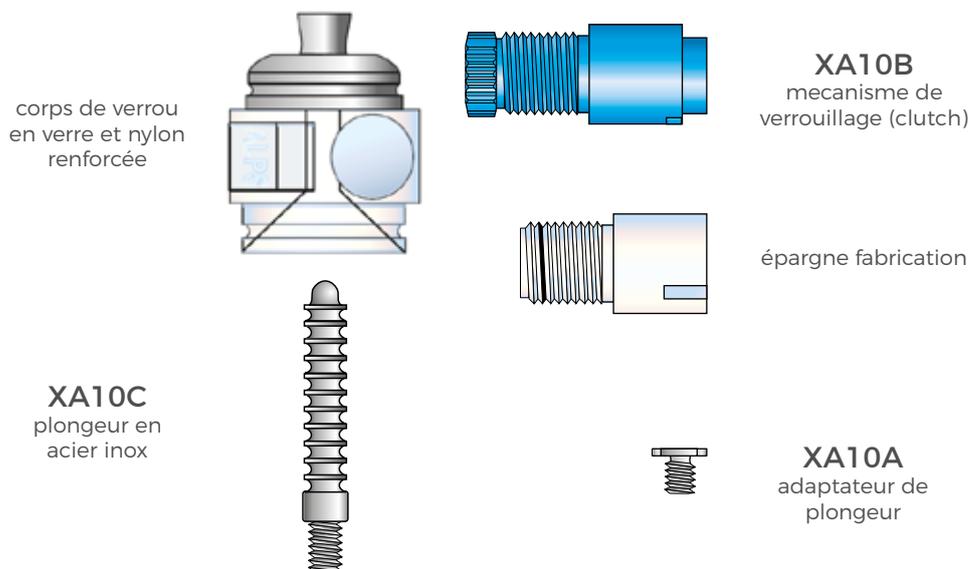

corps de verrou en verre et nylon renforcée

XA10B
mécanisme de verrouillage (clutch)

épargne fabrication

XA10A
adaptateur de plongeur



EN STOCK

NIVEAU D'ACTIVITÉ



PIÈCES DÉTACHÉES	DESCRIPTION
XA10B	mécanisme de verrouillage (clutch)
XA10C	plongeur en acier inox
XA10A	adaptateur de plongeur

SKIN RELIEVER

XA37 (ENCP)

Le **Skin Reliever** élimine les forces de cisaillement, les frottements et empêche les échauffements ainsi que les abrasions sur la peau du moignon.

Il supporte également les variations de volumes grâce à la grande souplesse de l'Easygel.

Le Skin Reliever peut être porté sous les manchons en silicone, gel et TPfoam.

Caractéristiques et applications :

- Réduit les frottements et les échauffements.
- Grande souplesse et élasticité.
- Profil affiné pour un maximum de confort et d'adaptabilité. 3/1.5 mm.
- Adoucit et apaise la peau.
- Contient un antioxydant pour une utilisation sur les peaux délicates.




CARACTÉRISTIQUES



NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE	3 MM
10-19 cm	XA3716
20-27 cm	XA3720
28-37 cm	XA3728

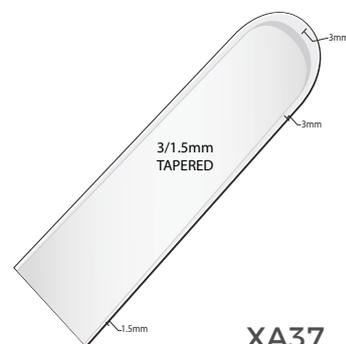

Mesurer la circonférence du moignon à 6 cm au-dessus de l'extrémité distale.

Utilisez le tableau pour sélectionner la taille du Skin Reliever.

PADSIL

XA50 (PDS)

Le **PadSil** a été développé pour augmenter le confort du patient en combinaison avec les manchons Alps.

Les amputés les plus actifs augmentent la pression distale et la fonction vasculaire des tissus distaux. Grâce au PadSil, ils bénéficient d'un amorti et d'un contact distal plus doux.

Les utilisateurs qui connaissent des changements de volume apprécieront également la possibilité des PadSil à trouver le meilleur positionnement dans leur emboiture.

Caractéristiques et applications :


- Silicone souple de qualité médicale.
- Ne se déforme pas dans le temps.
- Aide à maintenir un contact total.
- Peut être placé dans le manchon ou dans l'emboiture, peut être retouché.



NIVEAU D'ACTIVITÉ



TAILLE Ø	RÉFÉRENCE
55 mm	XA5001
65 mm	XA5002
80 mm	XA5003
95 mm	XA5004
105 mm	XA5005

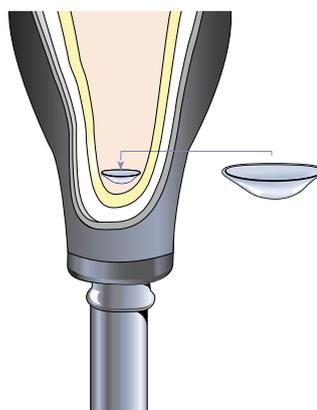

sans accrochage distal ou
avec manchon cushion



avec accrochage
distal

VALVE DE DÉPRESSURISATION

XA1000 (VIP)

Le **VIP** est une valve à dépressurisation active pour les emboîtures prothétiques. Son utilisation fournit aux patients un contact total continu lors de la marche, et même lors de la station assise.

Le vide créé par le système stabilise le membre résiduel. Cela est essentiel pour une répartition uniforme et totale du contact, sur toute la surface du membre résiduel.

Vous obtiendrez ainsi un contrôle de la dépressurisation dans l'emboiture et vous réduirez les variations de volumes.

Caractéristiques et applications :


- 2 niveaux de dépressurisation disponibles : faible (150-250 mbar) et élevé (300-400 mbar).
- Améliore les flux circulatoires.
- Réduit le pistonement et les rotations d'emboiture.
- Améliore le contrôle de la prothèse et la marche.
- Facile à installer/retirer dans l'emboiture et interchangeable en fonction de la dépressurisation souhaitée.
- Ne nécessite pas l'utilisation de piles ou d'autres sources d'alimentation.
- Il est léger (65gr) et n'affecte pas l'aspect esthétique de la prothèse.
- Pour emboitures test ou définitives.



NIVEAU D'ACTIVITÉ



XA1000L	XA1000H	XA1000E
Dépressurisation faible 150-250mbar	Dépressurisation élevée 300-400mabr	Épargne de fabrication nécessaire au bon montage du système

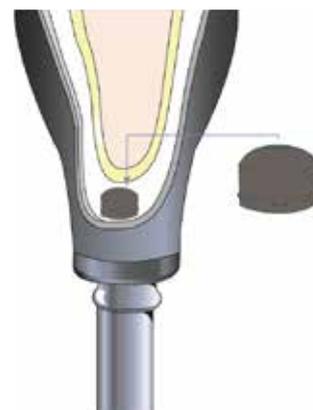

CRÈME ANTI-OXYDANTE

XA9001 (ANT-CP50)

La crème anti-oxydante protège la peau irritée et aide à réduire les frictions, elle soulage les douleurs et démangeaisons.

Caractéristiques :

- Pour une utilisation quotidienne.
- Lavage facile de la peau et des manchons.
- Légèrement parfumée.
- Compatible avec les manchons silicone, uréthane et copolymère.
- Flacon de 50ml.



LUBRIFIANT DE CHAUSSAGE

XA9002 (PA604)

La crème anti-oxydante Ce lubrifiant est utilisé pour aider à chauffer les manchons à colerette ou non, revêtus dans l'emboîture.

Caractéristiques :

- Composé d'alcool isopropylique, qui s'évapore sans laisser de résidus et laisse l'emboîture propre.
- Compatible avec les gels copolymère et silicone.
- Spray de 443ml.



NETTOYANT PROTHÉTIQUE

XA9003 (PD595)

Le **nettoyant prothétique** sans savon est conçu pour nettoyer les manchons et préserver l'état d'origine de ceux-ci.

Formule contenant des propriétés bénéfiques pour l'état cutané des membres résiduels.

Caractéristiques :

- Compatible avec les manchons silicone, uréthane et copolymère.
- Flacon de 472ml.



LOTION DE SOIN

XA9010 (SL108)

La **lotion de soin** hydrate et apaise les peaux sèches et sensibles. Elle préserve l'état cutané des membres résiduels.

Caractéristiques :

- Hypoallergénique, sans parfum ni colorant.
- Ne laisse pas de sensation grasse sur la peau.
- Flacon de 118ml.



GARANTIE

MANCHONS

RÉFÉRENCES

XA38 AKDT / AKDTHD / AKFR / AKFRHD

XA41 APDT-TP / APFR-TP

XA44 ECDTHD / ECFRHD

XA35 ELDT / ELFR

XA35 ELPX

XA39 EZF

XA43 SAFR / SBFR

XA36 GPDT / GPFR

XA46 PSI

XA42 SPDTHD / SPFRHD

XA45 LSC / LSL

NOM

EXTRÊME LINER

BLACK LINER TAPERED

SKIN LINER

EASY LINER

EASY LINER SUPERSTRETCH

EASYFLEX LINER

SMART SEAL LINER

GENERIC LINER

FLEXSEAL LINER

BLACK LINER HD

SILICONE PRO LINER

GARANTIE

12 MOIS

12 MOIS

12 MOIS

12 MOIS

6 MOIS

12 MOIS

6 MOIS

12 MOIS

6 MOIS

12 MOIS

12 MOIS

GENOUILLÈRES DE SUSPENSION

RÉFÉRENCES

XA34SFB SFB / SFBHD

XA32FR SFR

XA34SFX SFX

XA32 SLE

NOM

SUPÉRIEURE SLEEVE

EASY SLEEVE

FLEX SLEEVE

EASY SLEEVE SUPERSTRETCH

GARANTIE

2 MOIS

3 MOIS

3 MOIS

3 MOIS

ACCROCHAGES

RÉFÉRENCES

XA10 S498

NOM

ACCROCHAGE DISTAL
AVEC PYRAMIDE

GARANTIE

6 MOIS

GARANTIE

EXTRAS

RÉFÉRENCES

XA37 ENCP
XA50 PDS
XA1000 VIP

NOM

SKIN RELIEVER
PADSIL
VALVE DE
DÉPRESSURISATION

GARANTIE

1 MOIS
6 MOIS
6 MOIS

SOINS

RÉFÉRENCES

XA9001 ANT-CP50
XA9002 PA604
XA9003 PD595
XA9010 SL108

NOM

CRÈME ANTI-OXYDANTE
LUBRIFIANT DE CHAUSSAGE
NETTOYANT PROTHÉTIQUE
LOTION DE SOIN

GARANTIE

90 JOURS
90 JOURS
90 JOURS
90 JOURS

CONTACTEZ-NOUS



ZA des Aubrières
31 Rue de la terre blanche
49412 SAUMUR



02 41 50 50 91



info@groupe-g2m.com

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ



Groupe G2M



GROUPE-G2M.COM

